

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедического изделия

MANUFLEX

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

DWR-202

WWW.ORLETT.RU

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микро-массажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах ORLETT Energy Line, изготовленных по технологии PROPRIOPRESSION®, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА

- Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание
- Стабилизирует и разгружает сустав
- Распределяет компрессию по всей длине ортеза, снижая её к краям
- Обладает противоотёчным действием
- Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»



ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПРЕМОДЕЛИРОВАННАЯ ШИНА И ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕНЬ

- Обеспечивают дополнительную фиксацию
- Облегчают болевые ощущения за счет ограничения подвижности

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- реабилитация после травм и операций на лучезапястном суставе;
- воспалительно-дегенеративные заболевания лучезапястного сустава и профилактика их обострений;
- тендомиопатии;
- профилактика травм и обострений заболеваний лучезапястного сустава.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ

При дополнительных нагрузках на лучезапястный сустав.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения изделия.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез подбирается на правую и левую руку. Перед надеванием убедитесь, что выбран правильный вариант ортеза (правый или левый).

1. Расстегните ремень-фиксатор.
2. Натяните ортез на руку так, чтобы большой палец поместился в специальный вырез. Отрегулируйте степень натяжения ремня-фиксатора.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава. Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Окружность лучезапястного сустава, см
S	14-16
M	16-18
L	18-20
XL	20-22

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

59,9% полиамид, 11% эластан, 5,1% термопластичный полиуретан, 24% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DWR-202, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

